



walkable

DIAGNOSTICA POSTURALE PIEDI CORPO



Home	Azienda	<p style="text-align: center;">WALKABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> → Plantari ortopedici → Plantari sportivi → Plantari comfort → Plantari scarpe da lavoro → Accessori → Diagnostica posturale 	<p style="text-align: center;">PAIN-STOPPER</p> <ul style="list-style-type: none"> → Per il tuo benessere → Per il benessere del tuo cavallo 	Contatti
------	---------	---	---	----------

Per conoscere i punti vendita specializzati contattare SPONSOR →

versione stampabile

invia questa pagina

WALKABLE PHOTO TEST

WALKABLE PHOTO-TEST, brevetto internazionale della SPONSOR, documenta in modo impeccabile ed economico l'assetto dei calcagni e fornisce i valori degli spessori dei cunei necessari per la loro normalizzazione posturale.

Agevolati dall'impiego di apposite talloniere removibili, si faranno posizionare i piedi in modo naturale sulla pedana graduata rilevandone i gradi di portamento (**ANGLETEST**). (fig. 1).

Rimosse le talloniere, si fotograferanno i calcagni utilizzando una speciale macchina fotografica digitale e fissata ad un supporto scorrevole su una base dotata di riferimenti graduati simili e diametralmente opposti a quelli per i piedi, (fig. 2).

Grazie pertanto alle caratteristiche della pedana, si effettueranno, senza bisogno di "mirare", due scatti (uno per piede, inquadrati secondo il loro asse longitudinale).

Un apposito "leggio" ed una pellicola trasparente scorrevole dotata di linee con diversi gradi d'inclinazione (0-18°) (fig. 4) consentiranno di rilevare con esattezza i gradi di valgismo o varismo dei retro piedi (linea tangente il malleolo ed il lato interno del calcagno (piede sinistro = 12°).

Sul "leggio" è riportata una tabella che indica lo spessore del cuneo supinatore/pronatore in funzione della misura della calzatura e dei gradi d'inclinazione. (Es.: calzatura 39-41, inclinazione 12° = mm.9,7).



fig. 1



fig. 2



fig. 3

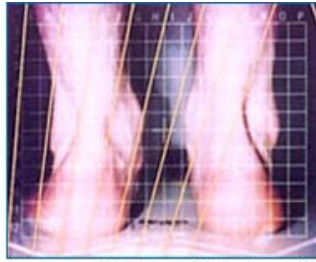


fig. 4




CONTROLLI POSTURALI PERIODICI

I controlli posturali periodici sono necessari per documentare nel tempo l'evoluzione posturale dei piedi trattati secondo una particolare metodica.



Prima (sinistro = 12° destro = 10°)

Recupero posturale (75%) su piedi con marcato valgismo e rigidità di caviglia.

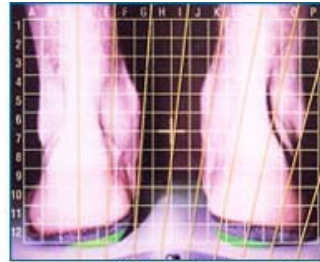

Dopo (sinistro = 4° destro = 3°5)

[TORNA ALLA DIAGNOSTICA POSTURALE →](#)